


### Modalità d'uso:

#### 1. Igiene delle palpebre e delle ciglia:

Aprire la confezione e svolgere la garza contenuta all'interno. Tenendo l'occhio chiuso, applicare delicatamente la garza sulle palpebre e alla base delle ciglia. Frizionare leggermente le palpebre con piccoli movimenti circolari per asportare delicatamente croste, secrezioni e tracce di trucco.

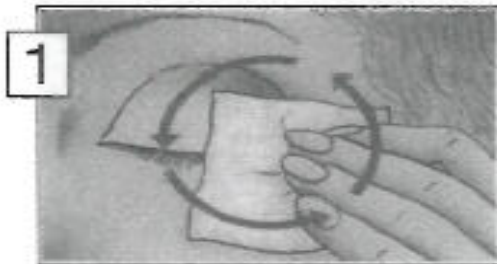

#### 2. Igiene del margine palpebrale:

Davanti allo specchio, abbassare delicatamente la palpebra inferiore esercitando una leggera trazione sulle ciglia. Arrotolare una garza su se stessa e frizionare con delicatezza il margine palpebrale.



Ripetere l'operazione anche per l'altro occhio, utilizzando una garza nuova.

Applicare in media due volte al giorno, mattina e sera.

Non occorre sciacquare dopo l'uso.

# Blephaclean

- 20 salviette imbevute sterili monouso
- **INDICAZIONI:**igiene quotidiana delle palpebre e delle pelli sensibili. Pulisce le impurità, le secrezioni e il trucco sulla palpebre e la pelle senza irritare.
- Senza alcool, detergenti né conservanti

 **Théa**

[www.oftadirect.it](http://www.oftadirect.it)